

健康定位鞋安卓版用户端

操作手册

目录

健康定位鞋安卓版用户端	1
操作手册	1
引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 读者对象	3
1.3 匹配机型及系统运行环境	3
1.4 版本更新	3
1.5 手机客户端下载	3
2 设备注册	3
2.1 登陆界面	3
2.2 注册	4
3.系统登陆	6
4 切换设备	7
5 设置	8
5.1 修改账户头像：	10
5.2 修改昵称：	11
5.3 修改密码：	12
5.4 关于我们：	13
5.5 退出登陆：	14
6 设备管理	14
6.1 头像设置	16
6.2 自定义关系修改	17
6.3 运动目标设置	18
6.4 设置围栏	19
6.5 远程关机	20
6.6 消息通知记录查看：	21
6.7 白名单设置	22
7.报警列表查看	24
8.查看位置	26
9.健康分析	28
10 服务充值	29

引言

1.1 编写目的

本文档是用来指导用户使用健康定位鞋安卓手机客户端。

1.2 读者对象

本软件使用用户：健康定位鞋安卓手机客户端操作者。

1.3 匹配机型及系统运行环境

本手机客户端手机支持安卓 4.4 及以上版本系统。

1.4 版本更新

应用启动时，系统自动提示有新版本。

1.5 手机客户端下载

通过浏览器打开应用市场搜索下载和安装。

2 设备注册

2.1 登陆界面

在手机中打开健康定位鞋 APP 进入主界面。



@健康定位鞋

2.2 注册

点击注册按钮进入健康定位鞋注册界面，并按界面提示正确填写相关信息；点击“注册”即可完成注册。

475B/s 4G 98% 10:07

< 返回



输入手机号



输入验证码

获取验证码



输入密码

确定


3.系统登陆

在手机中打开健康定位鞋 APP，在登录页面输入用户名和密码，点击登陆进入主页面。



4 切换设备

点击主界面的切换按钮进入设备切换界面，点击列表中的标题即可选中并作为当前设备。界面如图：

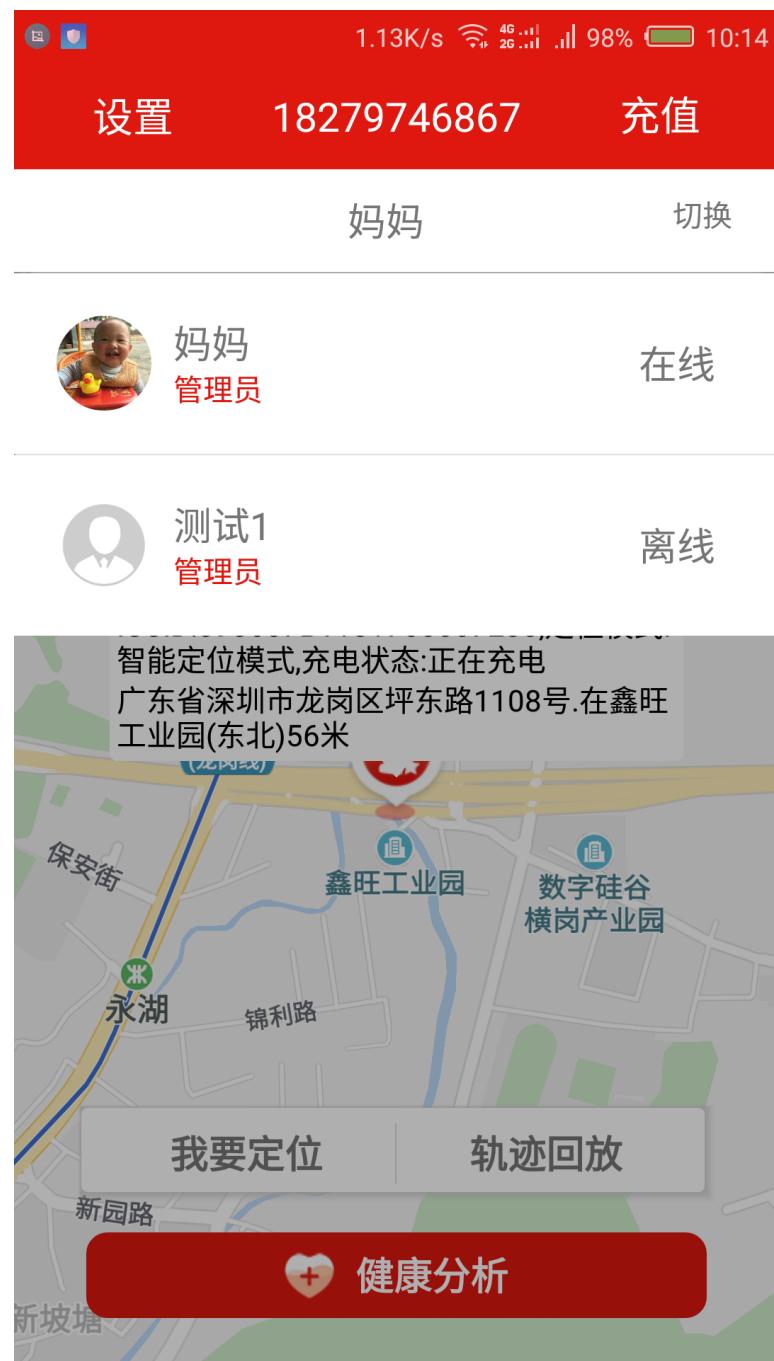

5 设置

点击左上方的更多进入设置界面。





18279746867



设备管理



修改密码




关于

退出登录


5.1 修改账户头像：

点击设置界面的 logo, 按照提示从相册中选择图片进行设置。界面如图：

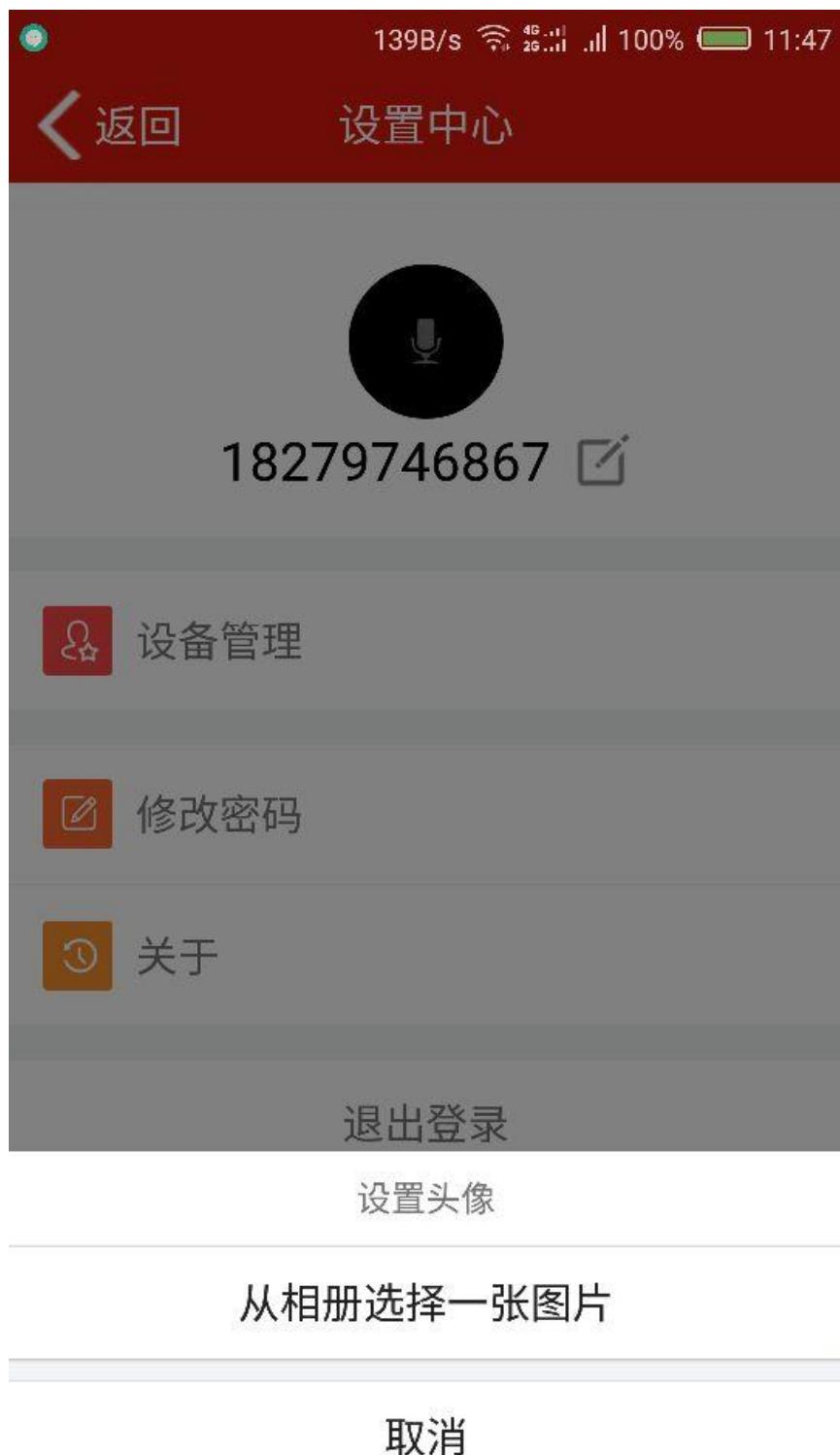


5.2 修改昵称：

点击昵称的修改按钮即可修改新的昵称，如图：

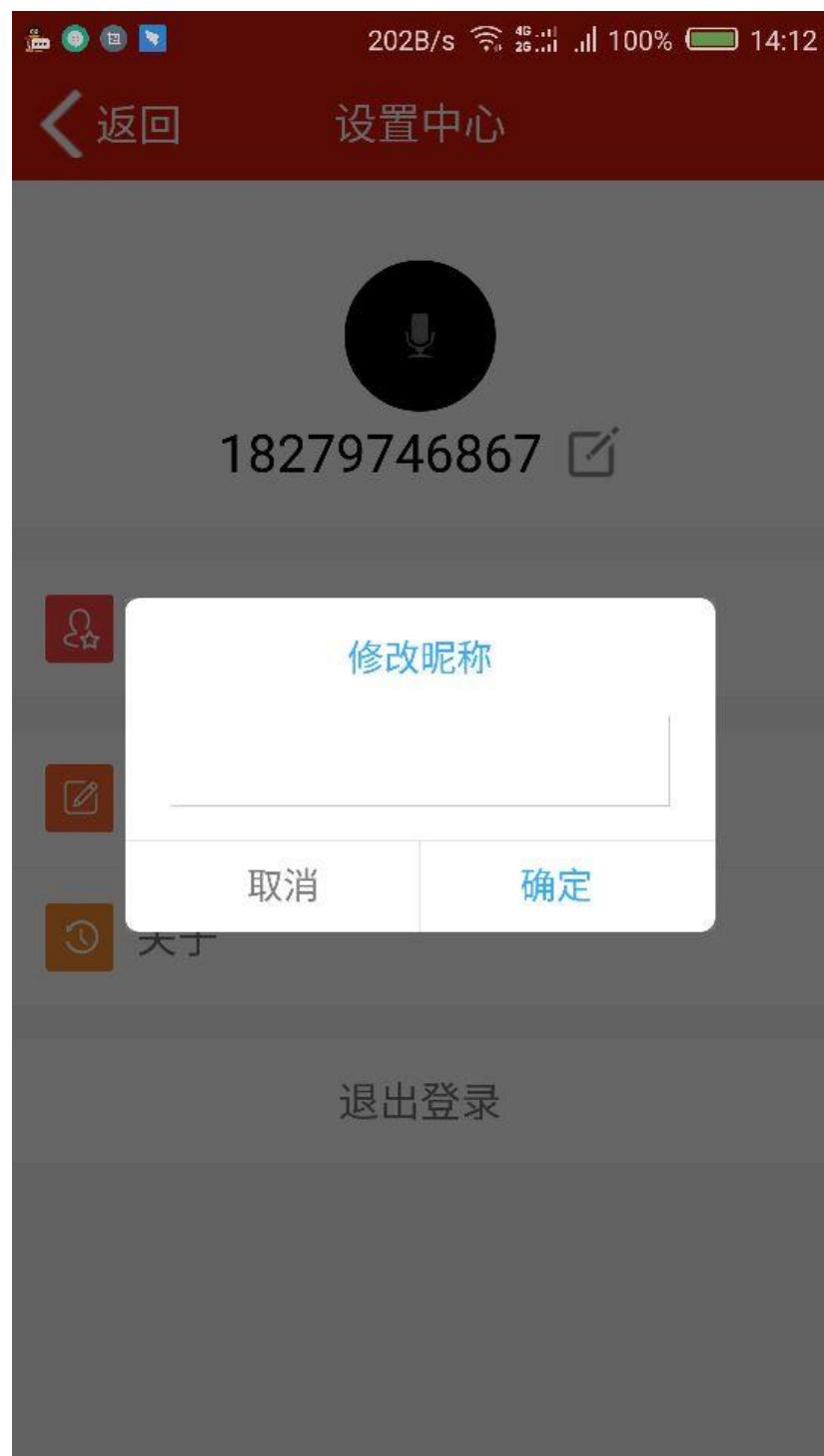

5.3 修改密码：

点击修改密码栏目，依次输入旧密码、新密码、确认密码并点击确定即可修改密码。如图：

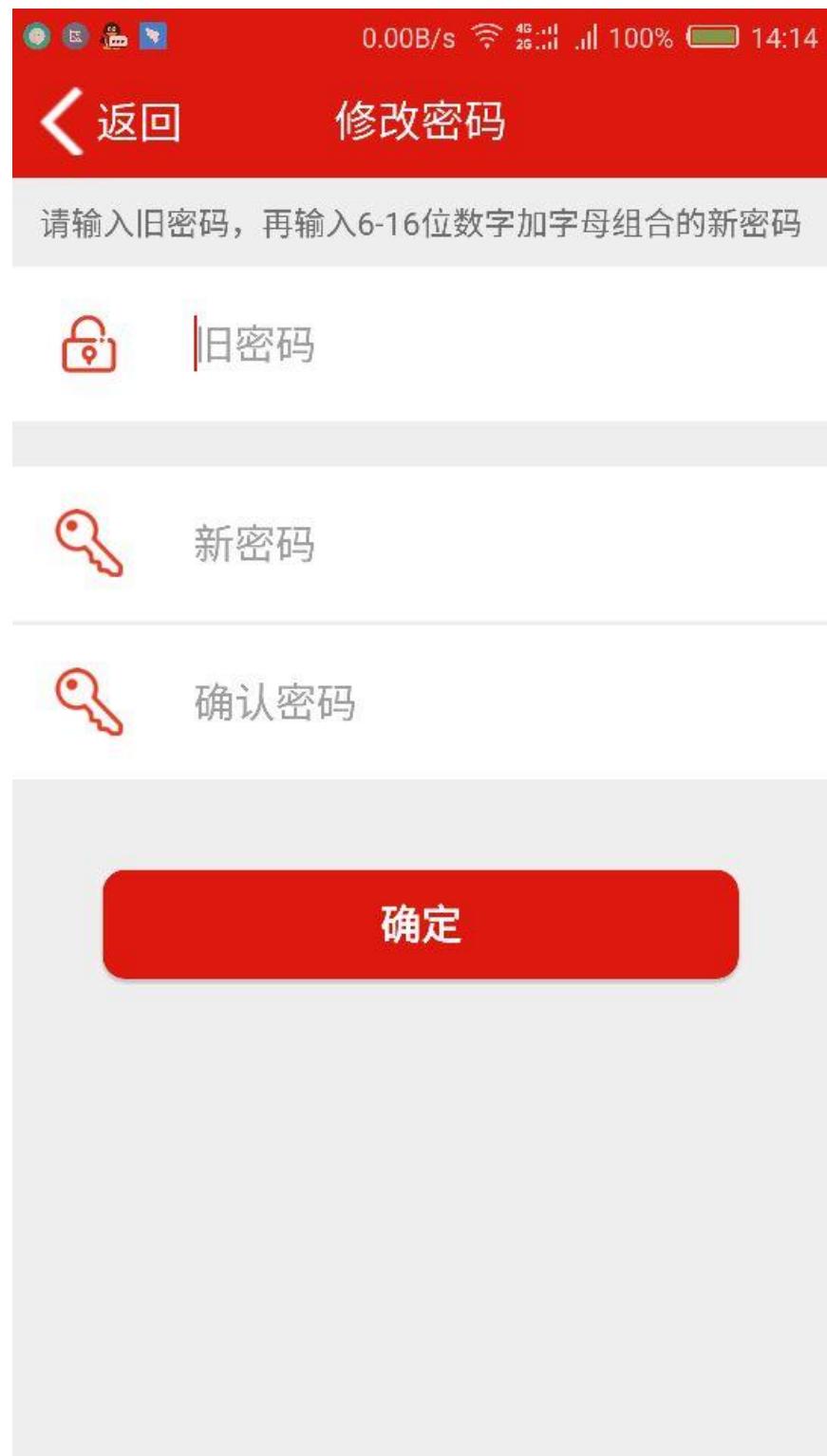

5.4 关于我们：

点击关于我们栏，进入关于我们界面，该界面可以检查更新 APP。



检查更新 >


广州市集赞科技有限公司©

5.5 退出登陆：

点击退出登陆按钮退出 APP。

6 设备管理

点击设置界面的设备管理进入设备列表界面，界面如图：

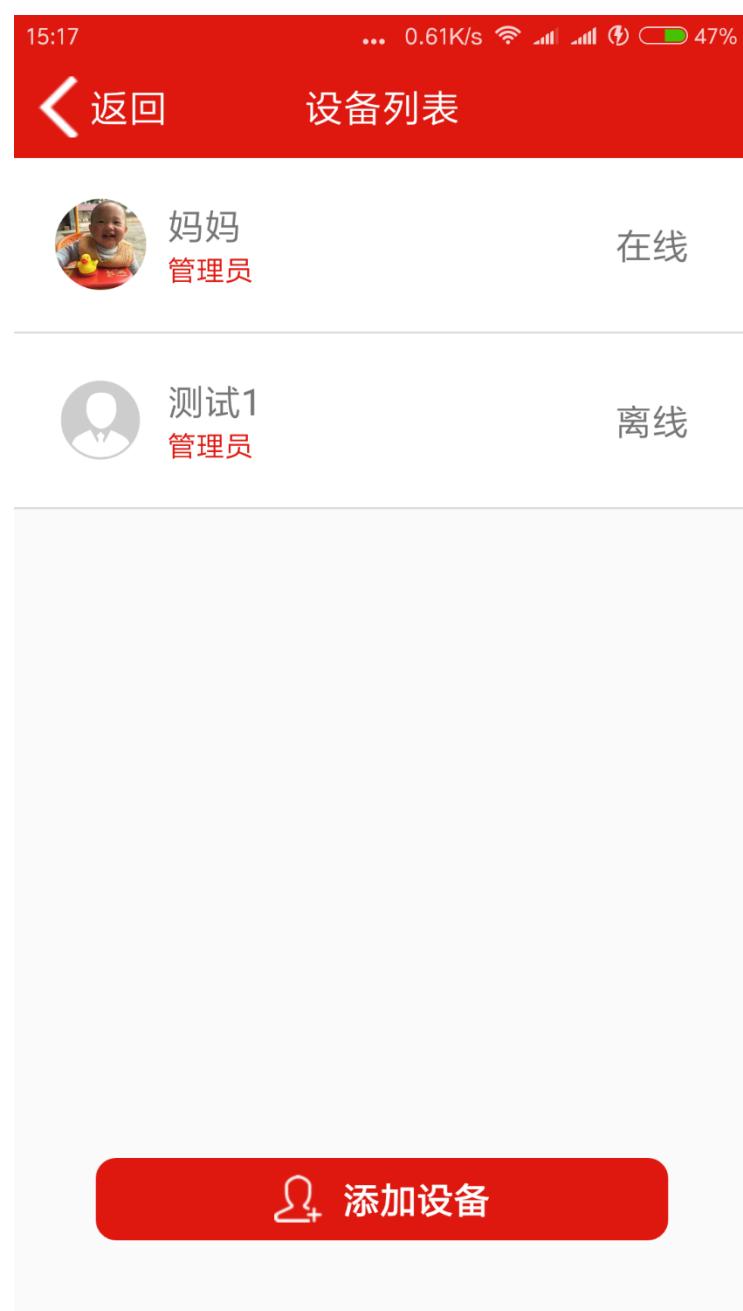

点击列表中的设备进入设备设置界面：



862623030096321

妈妈

修改 >

目标设置

>

设置围栏

>

远程关机

>

消息通知


>

白名单

>


6.1 头像设置

点击 logo，在下面弹出的选项选择从相册中选择图片，选中图片点击确定就可以设置 logo 了。

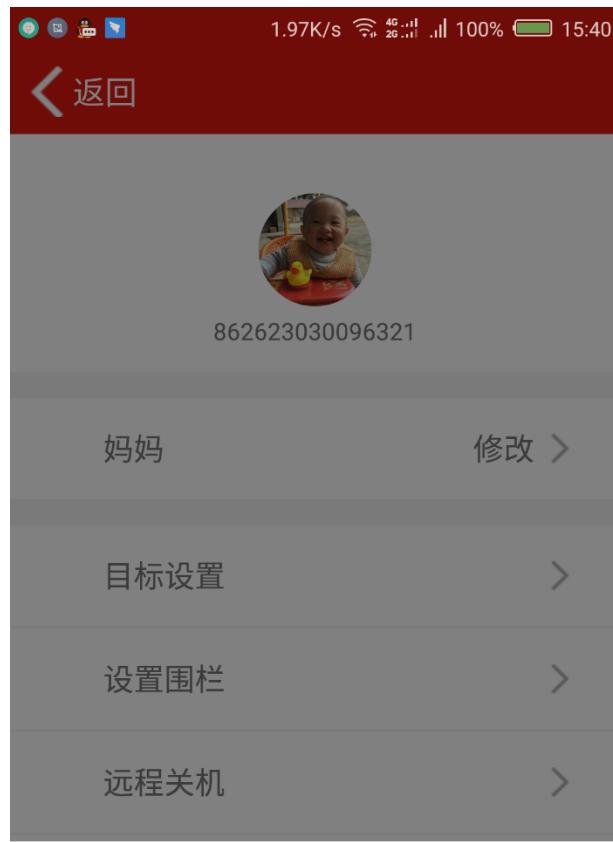


从相册选择一张图片

取消

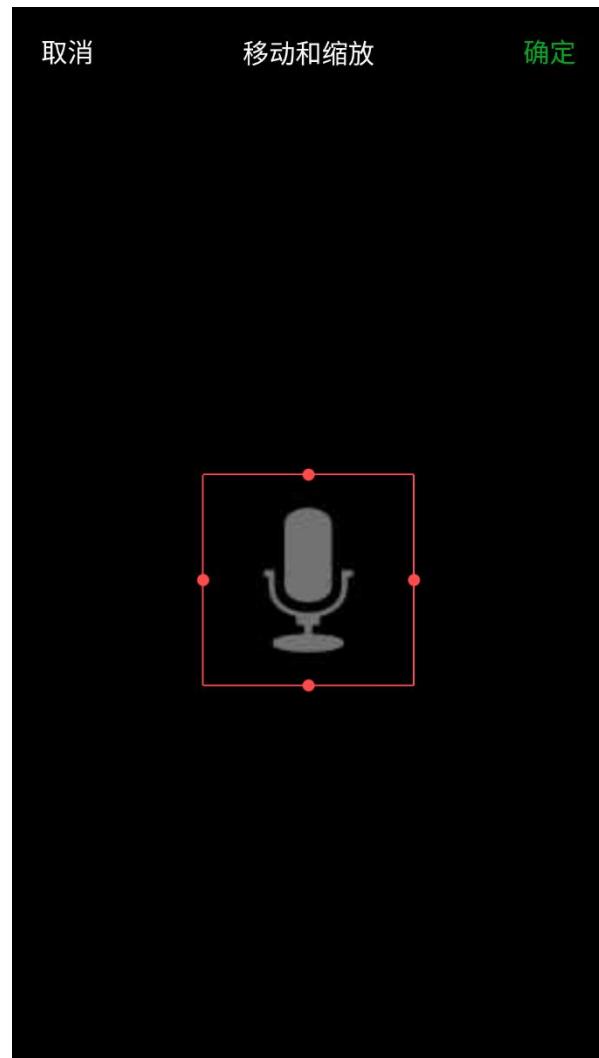

6.2 自定义关系修改

点击称谓后面的修改，即可修改设备使用者与账户主任的关系。

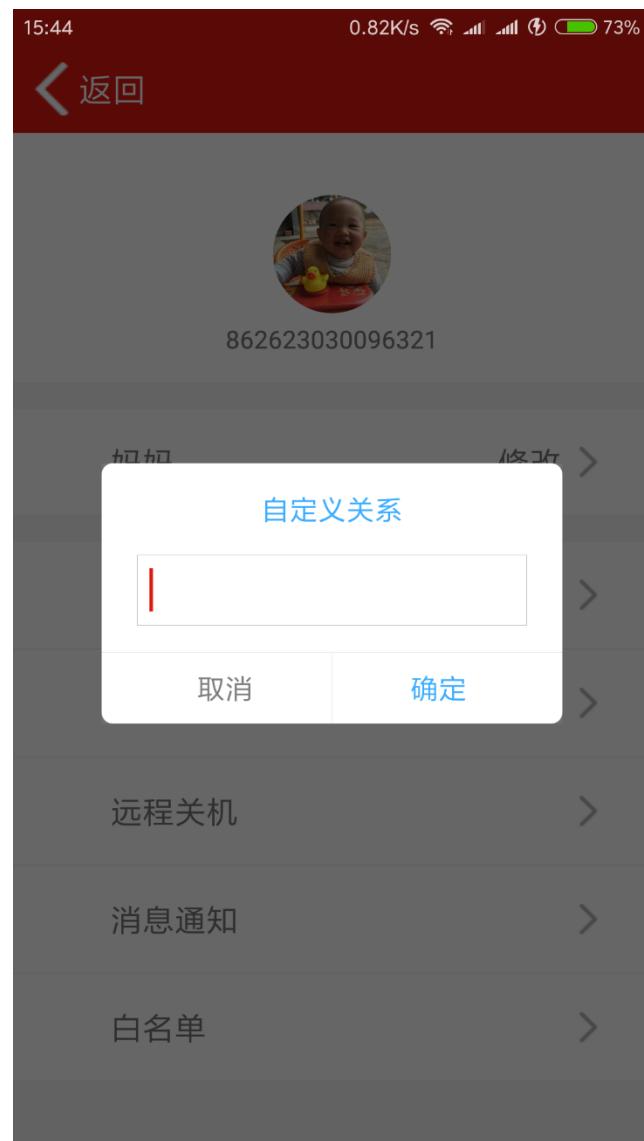


6.3 运动目标设置

点击该界面的目标设置会进入运动目标设置界面，在目标设定界面选定设定的目标。该界面可以设置每日运动的步数。如每日 3000 步等还可以自定义设置运动目标。




6.4 设置围栏

点击该界面的设置围栏会进入电子围栏设置界面，设置好围栏后点击完成修改即可完成设置。

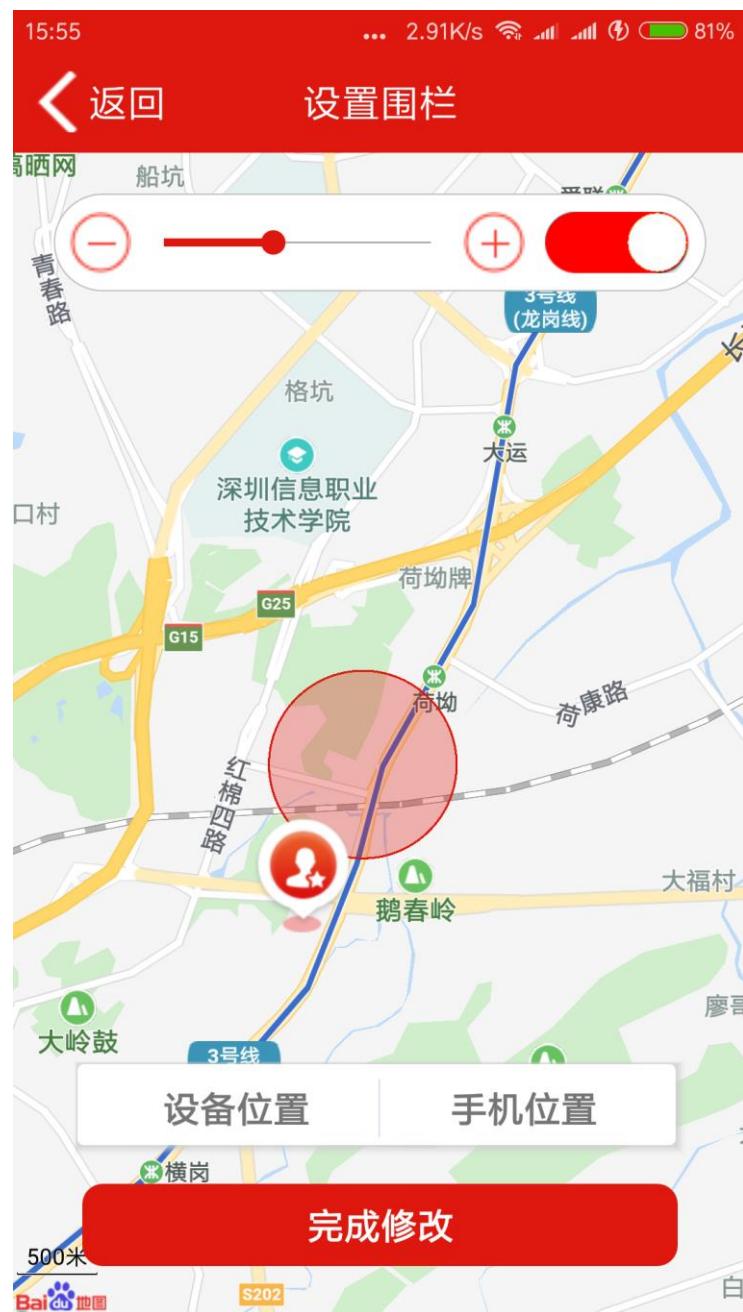

6.5 远程关机

点击该界面的远程关机，并在弹出的密码框中输入密码即可发送远程关机指令。
如图：

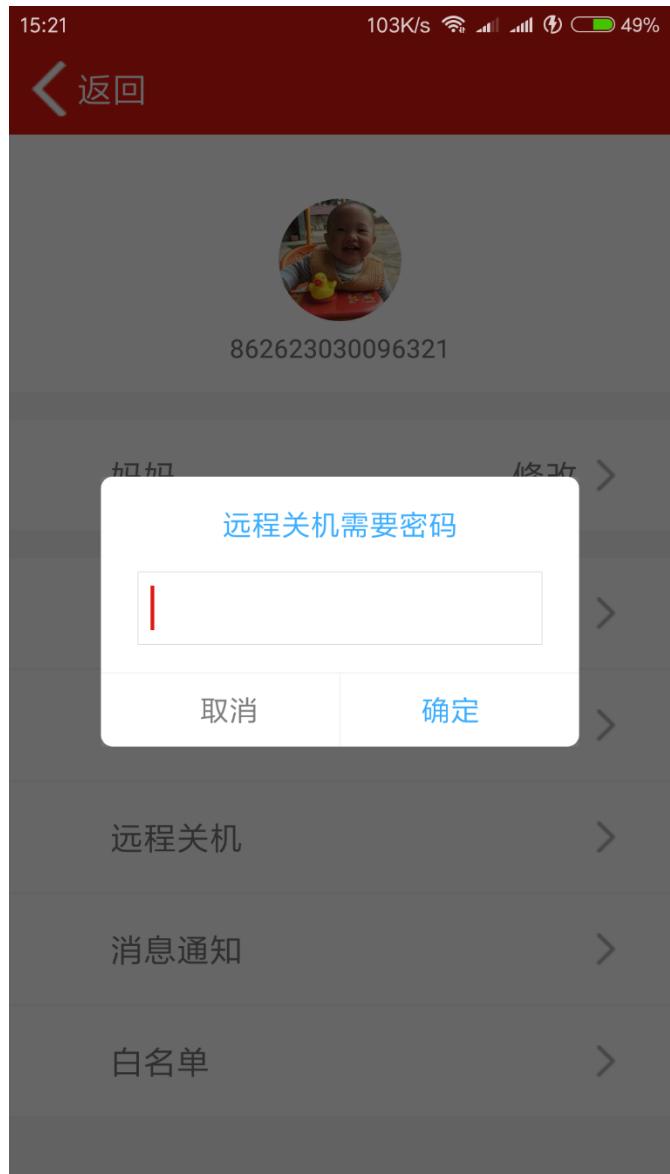


6.6 消息通知记录查看：


点击该界面的消息记录界面，进入消息记录查看界面，如图：



6.7 白名单设置

点击该界面的白名单栏，进入白名单设置界面点击添加并按提示输入相关信息即可添加新的白名单。点击已设置白名单后的按钮可以修改。

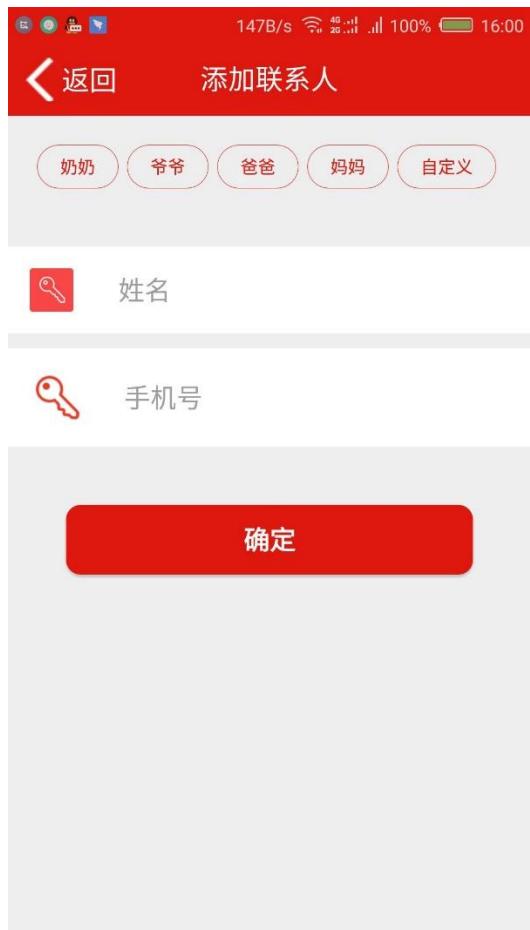

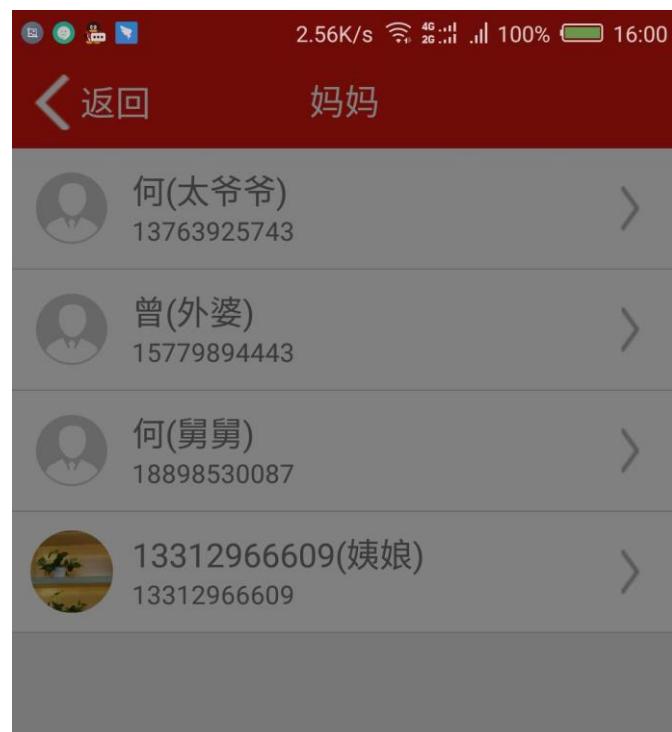

何(太爷爷)

设为管理员


编辑关系或名称

删除

取消

7. 报警列表查看

点击主页面的报警图标进入报警记录查看界面，点击忧伤角的设置按钮进入报警类型订阅设置。

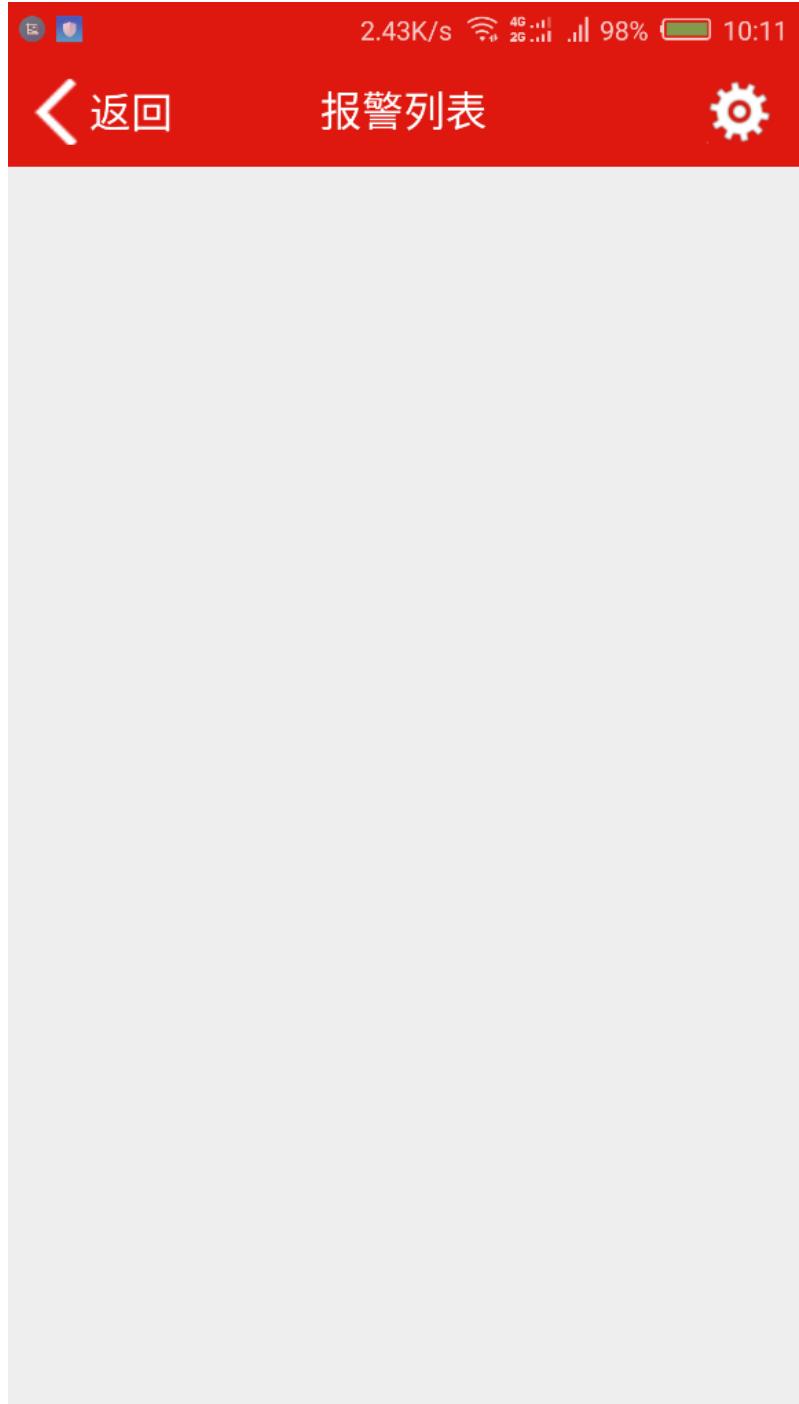




8. 查看位置

主界面可以查看设备位置，点击卫星图标可以将地图切换成卫星地图。



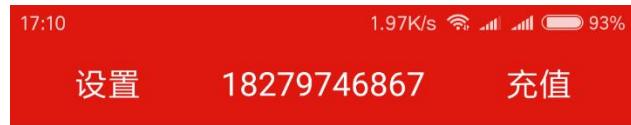

妈妈



9. 健康分析

点击健康分析进入健康分析界面。在该界面可以查看当日走路步数及卡路里消耗情况。



10 服务充值

点击主界面右上角的充值按钮对设备进行充值，选中充值的设备进入充值菜单选择界面。

